

OBTENGA LA MUESTRA DE ORINA

2



Nivel máximo
de orina

Termómetro

Verifique que el termómetro marque
entre 36° y 37° (grados centígrados).

Abra el vaso y obtenga la muestra de orina hasta el nivel del termómetro y cierre el vaso nuevamente. Siempre deberá vigilar el momento en el que el donante dé su muestra de orina para evitar que se altere con agua o cualquier otra sustancia.

La prueba se puede realizar a cualquier hora del día no importando el consumo de alimentos (No afecta el periodo de menstruación).

CÓMO LEER LOS RESULTADOS

3

Resultado
Listo



Espere unos minutos, desprenda la cubierta de la ventana de resultados y observe hasta que se marquen las líneas de cada droga.

RESULTADO NEGATIVO

4

Dos líneas
Resultado
Negativo



Cuando marquen las dos líneas por tira de la droga, el resultado será negativo, por tenue que sean estas líneas.

RESULTADO POSITIVO

5

Una línea
Resultado
Positivo



Cuando se marque solamente la línea superior de la tira de droga, el resultado será positivo.

DETECTAR A TIEMPO UNA ADICCIÓN
ES UNA OPORTUNIDAD DE VIDA

En caso de que salga positivo a alguna droga,
ante todo, reaccione con amor.



EMPLEADOS SANOS, EMPRESA SANA

Si requiere de apoyo contáctenos al:
01800 777 9045 o al 5207-9044 ext. 16

¿Dónde puede Obtener
más Información?

PreMedi test
01 800 777 9045

